



HEARTSINE SAMARITAN PAD « 350P » & « 360P »

DEFIBRILLATEUR

Garantie : 8 ANS

Bouton « Choc »

Sur DSA 350P uniquement

Utilisation Défibrillateur

Languette Extraction Electrodes



Témoin de Fonctionnement

Témoin clignote **VERT**

DAE prêt à l'emploi

Témoin clignote **ROUGE**

ou pas de témoin

Maintenance nécessaire

www.servicesecom.fr

PAD-PAK Adulte

➤ Réf. : Pad-Pak-03

PAD-PAK Pédiatrique

➤ Réf. : Pad-Pak-04

Date Péréemption PAD-PAK



BATTERIE + ELECTRODES

PAD-PAK « 2-en-1 »

Durée de Vie : +/- 4 ans

➤ Clic « droite / gauche »
Pour extraire le Pad-Pak

MAINTENANCE : l'appareil effectue un autotest hebdomadaire tous les dimanches à minuit

➤ Vérifier périodiquement le Témoin de Fonctionnement : « 1 fois/mois minimum »



Tél. : 09 61 45 61 95

Contrôle – Maintenance

Défibrillateur **HEARTSINE SAMARITAN PAD** « 350P » « 360P »

SERVICESECOM

Défibrillateur Automatisé Externe
MAINTENANCE REGLEMENTATION

www.servicesecom.fr

Exploitant :

Email :

Localisation DAE :

Réf. DAE : « 350P » ou « 360P »

Dates de Péréemption > Pad-Pak-03 :

Tél. :

Date Achat :

N° Série « SN » :

> Pad-Pak-04 :

Indicateurs / Témoins de Fonctionnement DAE		Observation
Contrôle Défibrillateur	Indicateur affiché	Action Corrective
⇒ Témoin Clignote Vert		
⇒ Témoin Clignote Rouge		
⇒ Pas de Témoin		
⇒ Bip Sonore		
⇒ Autotest		
⇒ Message Vocal		
PadPak « Adulte » Réf. : Pad-Pak-03		
PadPak « Enfant » Réf. : Pad-Pak-04		
⇒ Autre		

Défibrillateur Contrôlé par :

Service :

Email :

Tél. :

Date Contrôle :

Signature :

 Dysfonctionnement Défibrillateur ⇒ Adresser ce Document dûment renseigné à :

SERVICESECOM

Email : contact@servicesecom.fr

Tél. : +33 (0)9 61 45 61 95